

CANULA ARTHRO MEDIC

Registro ANVISA Nº: 80381210101

Nome Técnico: Cânulas



Antes do uso, leia atentamente as instruções presentes neste manual.

STERILE R Produto estéril



Nº de Lote, data de fabricação e validade:
Verificar rotulagem do produto



Fabricante recomenda uso único

Indicação / Finalidade:

A CÂNULA ARTHRO MEDIC fornece um instrumental eficaz para auxiliar na intervenção cirúrgica onde o cirurgião necessite de precisão para dissecação de planos anatômicos e ressecção tumoral.

Princípio de funcionamento:

A CÂNULA ARTHRO MEDIC fornece um instrumental eficaz para auxiliar na intervenção cirúrgica onde o cirurgião necessite de precisão para dissecação de planos anatômicos e ressecção tumoral. A cânula foi desenvolvida para auxiliar os cirurgiões em procedimentos cirúrgicos de cabeça e pescoço e otorrinolaringologia que necessite de precisão para dissecação de planos anatômicos e ressecção tumoral. A classe do laser que poderá ser utilizada com as cânulas é Classe 4.

Composição:

SUPORTE DA CÂNULA: Constituído em ABS

CÂNULA:

- Cabo: Constituído em Alumínio liga 6351;

-Tubo: Constituído em Aço Inoxidável ASTM F899.

BAIONETA

- Cabo da BAIONETA: Constituído em Alumínio liga 6351;

- Tubo da BAIONETA: Constituído em Aço Inoxidável ASTM F899

Modo de Uso:

O procedimento cirúrgico é a critério do médico cirurgião, a escolha do tipo de cânula e a metodologia de utilização variam de acordo com a técnica empregada. Esse produto deve ser utilizado somente por profissionais habilitados e treinados para as técnicas utilizadas.

Orientações gerais para procedimento com uso desse produto:

- Abrir a embalagem em condições assépticas;
- Sempre ter um produto sobressalente disponível;
- Escolha a ponteira que se adeque ao procedimento a ser realizado e conecte no punho de ABS e proceda conforme técnica cirúrgica indicada.

Após a utilização descartar o produto conforme Plano de Gerenciamento de Resíduos do estabelecimento de saúde para resíduo potencialmente contaminado.



Fabricante recomenda uso único deste produto.

Esta instrução de uso, por tanto, não explica ou discute procedimentos clínicos. Este somente descreve a operação básica e precauções relacionadas à operação deste instrumento.

Esterilização:

O método de esterilização utilizado é Radiação Gama conforme Norma ABNT NBR ISO 11137:2015 ou Plasma de Peróxido de Hidrogênio.

Validade:

2 anos.

Armazenamento:

Armazenar conforme normas para produtos correlatos, em local bem ventilado, limpo e fresco, sem presença de gases corrosivos, à temperatura e umidade ambiente. Não molhar ou danificar as embalagens originais.

Transporte:

Não são necessários cuidados especiais no transporte, os produtos podem ser transportados a temperatura e umidade ambiente.

ATENÇÃO: Evitar exposição prolongada a temperatura elevada.

Não exponha a temperatura acima de 54°C (130°F).

Advertências e Precauções:

- Recomendado uso único.
- Inspeccionar a integridade da embalagem antes de usar. Não usar o produto se a embalagem estiver avariada;
- Verificar a data de validade antes do uso. Não utilizar o produto se estiver com o prazo de validade vencido;
- O produto deve ser manipulado somente por profissionais de saúde capacitados;
- Sempre inspeccionar o produto antes da utilização;
- O produto deve ser manipulado assepticamente, seguindo os procedimentos para manipulação de produto estéril;
- Após o uso, deve ser descartado conforme protocolo do serviço de saúde para destinação de resíduos potencialmente contaminados.

Contraindicações:

Não há contraindicações para o uso do produto.

Efeitos Adversos:

Não há efeitos adversos para o uso do produto.

Garantia

Os produtos fabricados pela Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos

S/A. são garantidos contra defeitos de fabricação.

Os produtos que comprovadamente tenham apresentado defeito serão substituídos pela Bhio Supply. Para isso, os produtos deverão ser remetidos ao departamento de assistência técnica da Bhio Supply, acompanhados da descrição do defeito apresentado. Caso o produto estiver contaminado, o mesmo deve ser limpo e desinfetado antes do envio.

A garantia será invalidada caso seja verificado que o produto foi sujeito a manuseio inadequado.

Assistência Técnica:

A Bhio Supply presta assistência técnica para todos os seus produtos. Os canais de contato para assuntos relacionados a Assistência Técnica são os seguintes:

e-mail: assistencia@bhiosupply.com.br

Fone: +55 51 3459 4000

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N° 4959 – Esteio – RS – Brasil
CEP: 93.290.010

Dados do Fabricante:

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço:

Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

www.bhiosupply.com.br

Responsável Técnico:

Jaqueline Timm – CRF/RS 10514