

## Cânula Guia para Carga de Endogrampeador Bhio Supply

Registro ANVISA Nº: 82074729001

Nome Técnico: Cânulas



Antes do uso, ler atentamente as instruções presentes neste manual.



Produto estéril



Nº de Lote, data de fabricação e validade: Verificar rotulagem do produto.



Fabricante recomenda uso único.

### Indicação de uso / Finalidade:

A Cânula Guia para Carga de Endogrampeador Bhio Supply é um dispositivo médico utilizado em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos. Sua finalidade é auxiliar no posicionamento da parte ativa do endogrampeador junto a vasos, estruturas e tecidos, atuando como um guia para carregar e direcionar o instrumento.

### Princípio de funcionamento:

O endogrampeador é um grampeador linear cortante endoscópico, recarregável indicado para diversos tipos de procedimentos em cirurgia geral, cirurgia urológica e cirurgia torácica. A Cânula Guia para Carga de Endogrampeador Bhio Supply se conecta à extremidade da parte ativa do grampeador permitindo um melhor posicionamento do instrumento no tecido ou órgão que será manipulado, garantindo assim a perfeita ação do dispositivo.

### Especificações / Composição:

A Cânula Guia para Carga de Endogrampeador Bhio Supply é fabricada 100% em silicone.

### Embalagem:

A Cânula Guia para Carga de Endogrampeador Bhio Supply é fornecida esterilizada por óxido de etileno, em embalagem individual contendo uma unidade.

O produto é acondicionado em embalagem primária composta por material tubular de Tyvek® laminado com PET/PE.

### Modelos:

0MMGG2A0.

### Modo de Uso:

Este produto deve ser manipulado exclusivamente por profissionais habilitados e treinados para a realização de procedimentos cirúrgicos conforme indicação e finalidade, em ambiente estéril, seguindo técnica asséptica e conforme protocolo do serviço de saúde.

A técnica cirúrgica é a critério do médico cirurgião, a escolha do tipo de produto e a metodologia de utilização variam de acordo com a técnica empregada.

1. Avaliar se a embalagem do produto está íntegra. **NÃO UTILIZAR SE ESTIVER DANIFICADA;**
2. No campo cirúrgico estéril, abrir a embalagem primária;
3. Acoplar a Cânula Guia para Carga de Endogrampeador Bhio Supply à parte ativa do endogrampeador, sendo utilizada para posicionar e direcionar a bigorna sob o vaso ou tecido a ser seccionado durante o procedimento cirúrgico, conforme técnica indicada;
4. Após o uso, descartar conforme regulamento do serviço de saúde para produtos potencialmente contaminados.

#### **Advertências e Precauções:**

- Devido as características do produto, o fabricante recomenda uso único;
- Não aplicar força excessiva durante o acoplamento, evitando a desconexão do instrumento;
- Verificar a validade e integridade da embalagem antes do uso. Não utilizar após o vencimento.
- Não permitir que o produto entre em contato com qualquer instrumento eletrificado.
- Toda a equipe médica é responsável por usar a técnica apropriada e decidir sobre a indicação de uso deste dispositivo com base em sua própria experiência, treinamento e opinião médica. O médico deve ser treinado e habilitado para a realização desse tipo de cirurgia;
- Ler atentamente todas as instruções de uso e rotulagem. O produto só deve ser aplicado para o uso pretendido e de acordo com estas instruções;
- O produto deve ser manipulado somente por profissionais da saúde capacitados e assepticamente, seguindo os procedimentos para manipulação de produto estéril;
- Após o uso, deve ser descartado conforme protocolo do serviço de saúde para destinação de resíduos potencialmente contaminados.

#### **Contraindicações / Efeitos Adversos:**

Não há contraindicações ou efeitos adversos conhecidos relacionados ao uso do produto.



**Fabricante recomenda o uso único deste produto!**

#### **Esterilização:**

O produto é esterilizado por óxido de etileno.

#### **Validade:**

2 anos.

**Informações de lote, fabricação e validade:** consultar rotulagem do produto.

#### **Armazenamento / Transporte:**

- Armazenar em local limpo, fresco, seco e ventilado, livre de gases corrosivos.
- Não expor a umidade e evitar danos à embalagem original.
- Transportar o produto conforme normas para dispositivos médicos. Não são necessários cuidados especiais no transporte, os produtos podem ser transportados a temperatura e umidade ambiente.

#### **Garantia:**

A Bhio Supply fornece garantia a este produto contra defeitos de fabricação, desde que utilizado conforme estas instruções e dentro do prazo de validade da esterilização. Esta garantia será invalidada caso seja verificado que o produto foi submetido a manuseio inadequado.

Caso surja algum problema no uso ou manuseio, contatar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) imediatamente. Os produtos deverão devolvidos devidamente limpos e desinfetados.

e-mail: [sac@bhiosupply.com.br](mailto:sac@bhiosupply.com.br)

Fone: +55 51 2165-0049

Endereço: Av. Edgar Hoffmeister, N°400 – Campo Bom/RS - Brasil - CEP: 93700-000

**Fabricante Legal:**

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A

CNPJ: 73.297.509/0002-00

Endereço: Av. Edgar Hoffmeister, N°400 – Campo Bom/RS - Brasil

Telefone SAC: +55 51 2165-0049

[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

**Responsável Técnico:**

**Aline Sperluk Martins – CRF/RS 587896**

**Unidades Fabris:**

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A

CNPJ: 73.297.509/0002-00

Endereço: Av. Edgar Hoffmeister, N°400 – Campo Bom/RS - Brasil

Telefone SAC: +55 51 2165-00459

[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

**Responsável Técnico:**

**Aline Sperluk Martins – CRF/RS 587896**

Bhio Supply Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos S/A.

CNPJ: 73.297.509/0001-11

Endereço: Av. Luiz Pasteur, N°4959 – Esteio/RS - Brasil

Telefone/Fax: 55 51 3473-7450 / 3458-4479

Telefone SAC: 55 51 3459-4000

[www.bhiosupply.com.br](http://www.bhiosupply.com.br)

**Responsável Técnico:**

**Jaqueline Timm – CRF/RS 10514**